

サージカル95

特殊フィルターで

マイクロメートル
3 μ mの粒子を95%以上カット!

1 μ m=0.001mm

樹脂製ノーズブリッジ
でピッタリフィット

BFE95%以上



耳が痛くなりにくい
丸ゴム使用


花粉症・
インフルエンザ対策に!

不織布マスク

耳掛け

イラストはイメージです

サージカル95

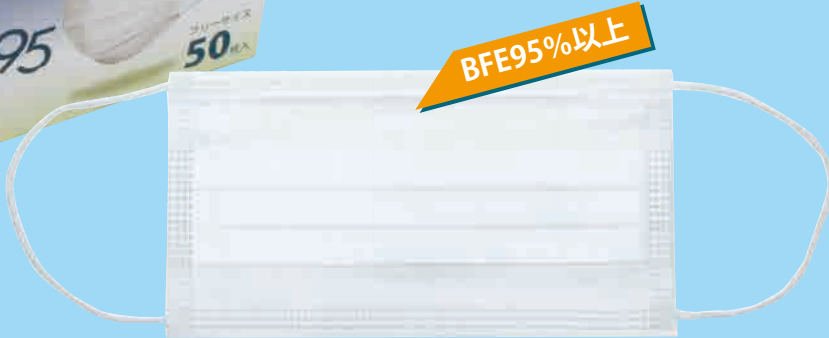


- 3層構造のマスクで、中間層にフィルターを配しています。
- ノーズブリッジ付きで顔にフィット。
- 装着に便利な耳掛けタイプです。

▼着用方法




①ノーズブリッジを片手で押さえながらあごを包むようにマスクを下まで伸ばしてください。

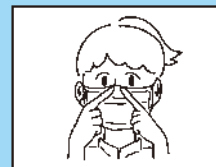

②マスクを鼻にきちんと当て、隙間が生じないようにノーズブリッジを折り曲げてください。

▼取り外し方法

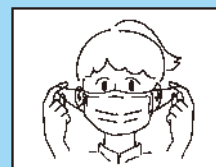

マスク表面に手を触れないようにゴム紐を持って外し、破棄してください。

● BFEとは？

BFE=細菌ろ過効率。

細菌を含む、平均約 $3\mu\text{m}$ (0.003mm)の粒子がろ過される率(%)を示します。

数値が高いほどマスクの性能が良く、医療用マスクでは、95%以上の性能が求められます。

本品に使用されているフィルターはBFE95%以上の性能です。

● 「サージカルマスク」とは？

「サージカルマスク」とは、一般的に病院等で使われるものを指しますが、最近は一般的な病気予防のマスクも「サージカルマスク」と分類されるようになりました。

日本には医療用マスクの規格がないため、主に米国の医療用マスク規格ASTM-F2100が適用されています。

品名	マスク (商品名：サージカル95)
フィルタ部の品質性能	BFE95%フィルタ採用 試験方法：ASTM F2101-14
色	ホワイト
対象	風邪・花粉・ほこり等
入数	50枚×40箱
素材	本体：ポリプロピレン 耳紐：ポリエステル・ポリウレタン ノーズブリッジ：ポリエチレン
JANコード	4990798847726
ITFコード	14990798847723

MADE IN CHINA

⚠ 使用上のご注意

- マスクは感染を完全に防ぐものではありません。
- 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある場合には使用しないでください。
- 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- 血液やだ液などで汚染された場合は、すみやかに廃棄し、新品と取り替えてください。
- 使用する際はブリーツを十分に伸ばして、鼻と口を広く覆うようにしてください。
- 本品を有害な粉塵やガス等が発生する場所や、それを防ぐ目的で使用しないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 本品は使い捨てです。一使用ごとにお取り替えください。



人にやさしく 食に思いやり

株式会社 **創業**

- 札幌支店 Tel.011(806)0280 Fax.011(860)6661
- 仙台支店 Tel.022(388)8801 Fax.022(388)6665
- 東京営業部 Tel.03(5206)5055 Fax.03(5206)5155
- 大阪営業部 Tel.06(6695)3751 Fax.06(6695)3759
- 九州支店 Tel.092(688)9600 Fax.092(688)9609

