

2PLYマスク ~柔らか~

通気性がよく肌あたりがよいため、マスクの息苦しさを軽減
夏場の長時間の倉庫での作業や、食品製造でのご使用にオススメです

ノーズブリッジで
鼻にフィット

ソフトな肌触りの
不織布を使用！

通気性が良く
息がラク

表裏が
わかりやすい
刻印入り

紐が絡まりにくく
取り出しやすい！

耳掛け
タイプ

耳あたりの良い
やわらか丸ひも

頭掛け
タイプ

頭に優しく
フィットする
平丸ひも

耳掛け
タイプ

頭掛け
タイプ



耳掛けタイプ



品名	2PLYマスク～柔らか～耳掛け	入数	100枚×30箱
製品サイズ	約175×95mm	小箱サイズ	185×97×128mm
素材	本体：ポリプロピレン 掛け紐：ポリエステル ノーズブリッジ：ポリエチレン	ケースサイズ	500×390×405mm
		ケース重量	約9kg
		生産国	中国
不織布目付	外面：約25g/m ²	JANコード	4990798867823
	内面：約25g/m ²	ITFコード	14990798867820

装着方法

- 1 ノーズブリッジを片手で押さえながらあごを包むようにマスクを下まで伸ばしてください。



- 2 マスクを鼻にきちんと当てて、隙間が生じないようにノーズブリッジを折り曲げてください。




頭掛けタイプ



品名	2PLYマスク～柔らか～頭掛け	入数	100枚×20箱
製品サイズ	約175×95mm	小箱サイズ	185×97×148mm
素材	本体：ポリプロピレン 掛け紐：ポリエステル ノーズブリッジ：ポリエチレン	ケースサイズ	500×390×316mm
		ケース重量	約7kg
		生産国	中国
不織布目付	外面：約25g/m ²	JANコード	4990798868226
	内面：約25g/m ²	ITFコード	14990798868223

装着方法

- 1 掛け紐を伸ばし、頭上から被ります。

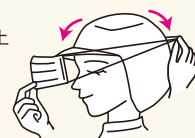

- 2 下側の掛け紐を上側へ交差させます。



- 3 ノーズブリッジを片手で押さえながらあごを包むようにマスクを下まで伸ばして下さい。



- 4 マスクを鼻にきちんと当てて、隙間が生じないようにノーズブリッジを折り曲げて下さい。



使用上のご注意 ●本品を、ウイルス飛まつ・細菌飛まつ・有毒な粉塵・ガス等が発生する場所や、それを防ぐ目的で使用しないでください。●本品使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状を起こした時は、使用を中止してください。●臭いで気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。●乳幼児の手の届かない所に保管してください。●湿気の少ない清潔な所に保管してください。●火気に近づけないでください。●本品は使い捨てです。一使用ごとにお取り替えください。●マスク以外の用途に使用しないでください。



株式会社 旭創業

■札幌支店 Tel.011(806)0280 Fax.011(860)6661
 ■仙台支店 Tel.022(388)8801 Fax.022(388)6665
 ■東京支店 Tel.03(5206)5055 Fax.03(5206)5155
 ■長浜支店 Tel.0749(79)8118 Fax.0749(79)8119
 ■大阪支店 Tel.06(6695)3751 Fax.06(6695)3759
 ■広島支店 Tel.082(532)6155 Fax.082(532)6159
 ■九州支店 Tel.092(688)9600 Fax.092(688)9609

